




# Bure™

## Gehwagen

Bure Double EL 56-313

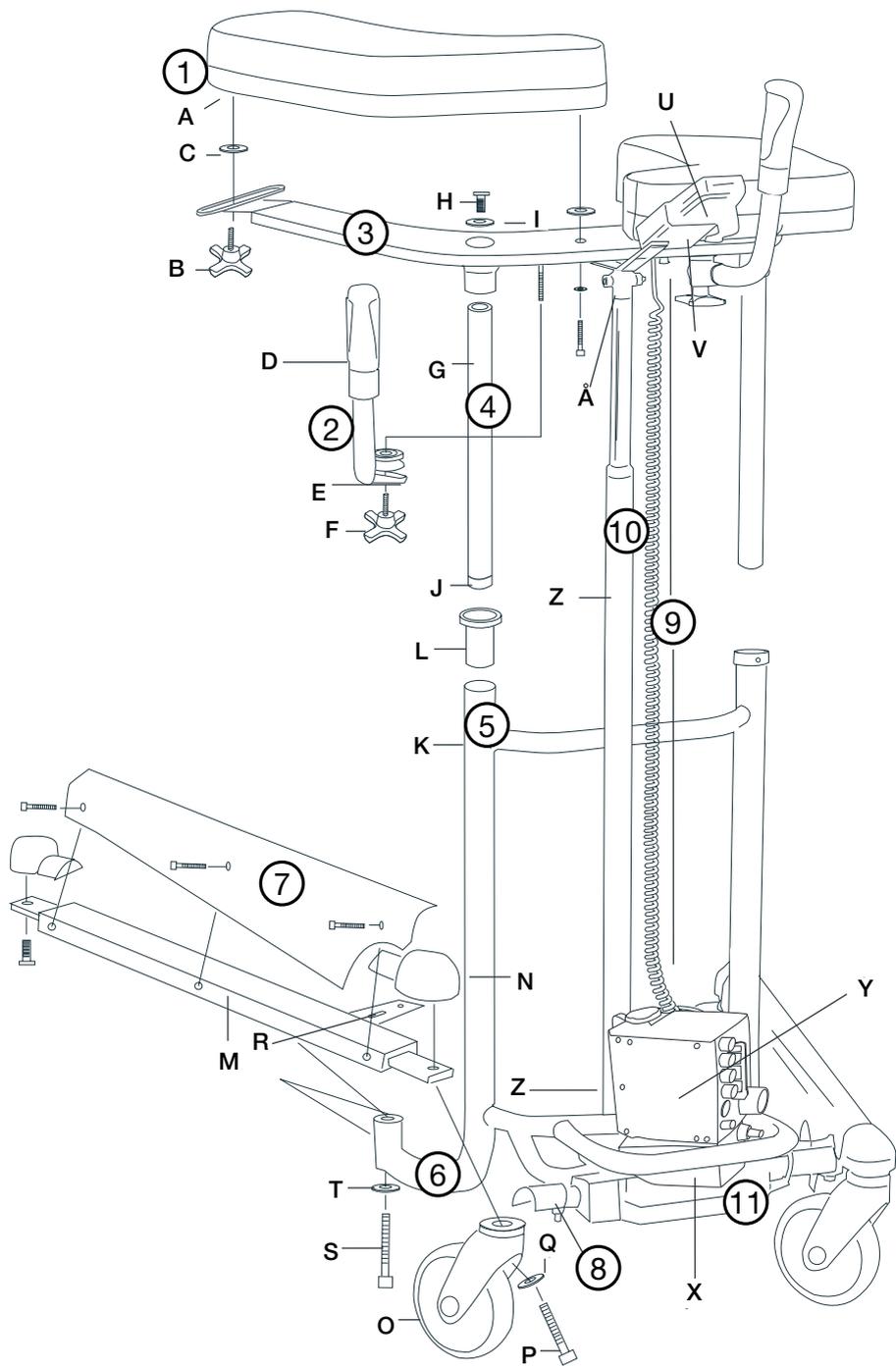

# Detailverzeichnis

<p><b>1</b> <b>A</b> Armstützplatte <b>B</b> Handrad <b>C</b> Kunststoffscheibe</p>	<p><b>6</b> <b>M</b> Radstativ <b>N</b> Befestigungs-/Gussteile <b>O</b> Rad <b>P</b> Bolzen <b>Q</b> Unterlegscheibe <b>R</b> Verbreiterungseisen <b>S</b> Befestigungsbolzen <b>T</b> Unterlegscheibe</p>	<p><b>10</b> <b>Z</b> Verstellung (hoch/tief) <b>Ä</b> Schraube, Unterlegscheibe (2 St.), Mutter (Befestigung oben und unten)</p>
<p><b>2</b> <b>D</b> Handgriff+Griff <b>E</b> Klemme <b>F</b> Handrad</p>	<p><b>7</b> Schutzblech groß (Radstativ)</p>	<p><b>11</b> Aktuator Verbreiterung</p>
<p><b>3</b> Oberes Stativ</p>	<p><b>8</b> Schutzblech klein (Verbreiterung)</p>	
<p><b>4</b> <b>G</b> Verchromtes Rohr <b>H</b> Befestigungsschraube <b>I</b> Unterlegscheibe <b>J</b> Endbuchse</p>	<p><b>9</b> <b>U</b> Fernbedienung <b>V</b> Halter/Fernbedienung <b>X</b> Batterie <b>Y</b> Steuerbox</p>	
<p><b>5</b> <b>K</b> Halterung mit Batterieablage <b>L</b> Steuerbuchse</p>		


# Reserveteile

Nr	Art. Nr	Beschreibung
-	56-305	Ausbesserungsfarbe Bure, Silber 8
-	56-306	Ausbesserungsfarbe Bure, dunkelgrau RAL 7021
1A	57-047	Armstützplatte rechts
1A	57-046	Armstützplatte links
V	56-328	Halterung für die Handkontrolle
L	56-340	Steuerbuchse
J	56-343	Endstück Steuerrohr
X	56-346-1	Batterie/LA31
X	56-346	Batterie/LA28
7	56-347	Schutzblech, links
7	56-348	Schutzblech, rechts
Z	56-349-1	Verstellung (hoch/tief)/LA31
Z	56-349	Verstellung (hoch/tief)/LA28
11	56-350-1	Verstellung (Verbreiterung)/LA31
11	56-350	Verstellung (Verbreiterung)/LA28
2	56-353	Handgriffssatz Bure Std (2 Paar inkl. Befestigungsrad/Klemmen)
N	57-603	Befestigungs-/Gussteile
N	57-308	Befestigungsteil/Kunststoff
-	56-387	Lenkrolle mit Bremse 75 mm
-	56-357	Lenkrolle ohne Bremse 100 mm
-	56-358	Lenkrolle mit Bremse 100 mm
-	56-360	Lenkrolle ohne Bremse 125 mm
O	56-361	Lenkrolle mit Bremse 125 mm
E	56-356	Verriegelungsklemme Handgriff
F	56-363	Rad zur Einstellung des Handgriffs
B	56-364	Rad zur Einstellung der Breite der Armstützplatten
U	56-371-1	Handkontrolle 4kanal (erhöhen/senken), Breite (einwärts/auswärts)/LA31
U	56-371	Handkontrolle 4kanal (erhöhen/senken), Breite (einwärts/auswärts)/LA28
-	56-374-1	Stromkabel/LA31
	56-374	Ladegerät/LA28
Y	56-345-1	Steuerbox 220V/LA31
Y	56-345-2	Steuerbox 110V/LA31

# Zubehör

Art. Nr	Beschreibung
56-325	Stehplatte Bure Double (Blech)
56-325-LOW	Stehplatte Bure Double (Blech), besonders niedriger Einstieg
56-325-1	Stehplatte (Alu), Bure Double
56-354	Handbremszusatz (-0 Standard, -1 Einhandbremse)
56-329	Erhöhungssatz (+70 mm), Bure Double
56-334	Infusionshalter
56-335	Befestigung für Infusionshalter
56-336	Halterung für Sauerstoffflasche
56-337	Seitenstütze, verstellbar
56-338	Infusionsständer komplett mit Befestigung
56-389	Weicher Korb mit Befestigung


## Weitere Anleitungen

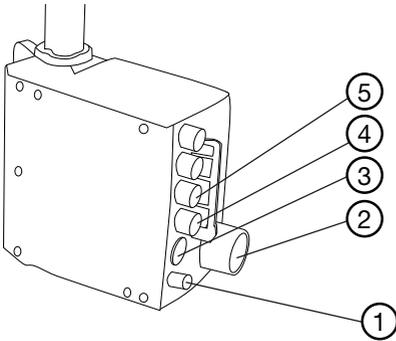

### Schaltplan Steuerbox

1. Anschluss für Batteriestecker.
2. Anschluss für Stecker.  
ACHTUNG! Damit die IP-Einstufung gültig ist, muss der Stecker **IMMER** an die Steuerbox angeschlossen sein.
3. Anschluss für Fernbedienung.
4. Anschluss für Aktuator – erhöhen/senken.
5. Anschluss für Aktuator - Verbreiterung (Nur Bure Double).

**ACHTUNG!** Stellen Sie sicher, dass die Stecker an die korrekten Anschlüsse angeschlossen sind, sonst können die Aktuatoren beschädigt werden.

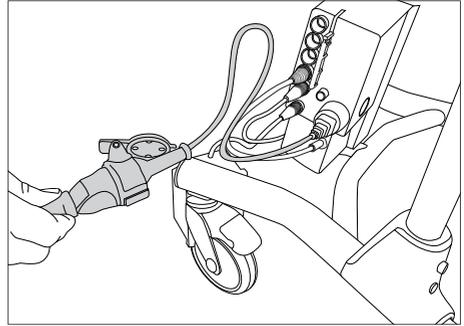

### Batterie aufladen

Die Batterie ist aufzuladen, wenn der Gehwagen nicht benutzt wird. (Die Batterie kann nicht übermäßig aufgeladen werden.)  
Aufgeladen wird, indem der Stecker in die Steckdose gesteckt wird.



Vor der ersten Verwendung muss die Batterie 24 Stunden aufgeladen werden.

## Allgemeine Pflegehinweise

- Wischen Sie bei Bedarf den Gehwagen und die Armstützplatten ab – verwenden Sie dafür Seifenlauge.



- Das Produkt muss sich **IMMER** stabil anfühlen. Kontaktieren Sie das Servicepersonal, sollte der Gehwagen schief stehen oder Geräusche erzeugen.
- Tauschen Sie defekte Teile sofort aus – sollte durch kompetentes Personal geschehen.
- Verwenden Sie Gehwägen mit elektrischen Aktuatoren **NIEMALS**, während sie geladen werden.
- Kontrollieren Sie, dass die Steuerrohre (4G) im oberen Rahmen angezogen sind (3).

# Sicherheitshinweise




Bure Gehwagen soll nur verwendet werden;

- als GEHHILFE in Innenräumen
- auf EBENEM und HARTEM Untergrund.

Beim Radwechsel muss das Gewinde des neuen Radbolzens mit einer Sicherung des Typs STARK gesichert werden. Wird die Schraube (S) abmontiert, muss das Gewinde beim erneuten Montieren mit einer Sicherung des Typs STARK gesichert werden.

**MAXIMALES BENUTZERGEWICHT 130 KG**

# ID-Kennzeichnung

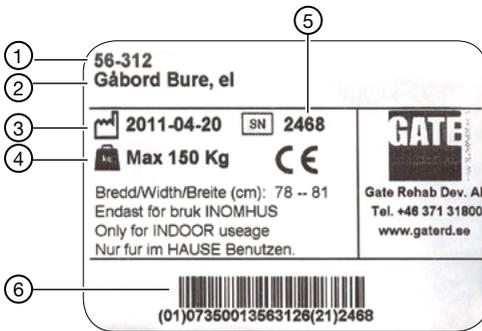

1. Artikelnummer
2. Produktname
3. Herstellungsdatum
4. Maximales Benutzergewicht
5. Seriennummer
6. EAN Code


# Garantie

Wir gewähren zwei Jahre Garantie auf eventuelle Herstellungsfehler (gilt nicht für Verschleißteile). Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:



Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2, SE-330 21 Reftale  
Tel.: 0046-(0)371-318 00  
info@gaterd.se

# Technische Spezifikationen

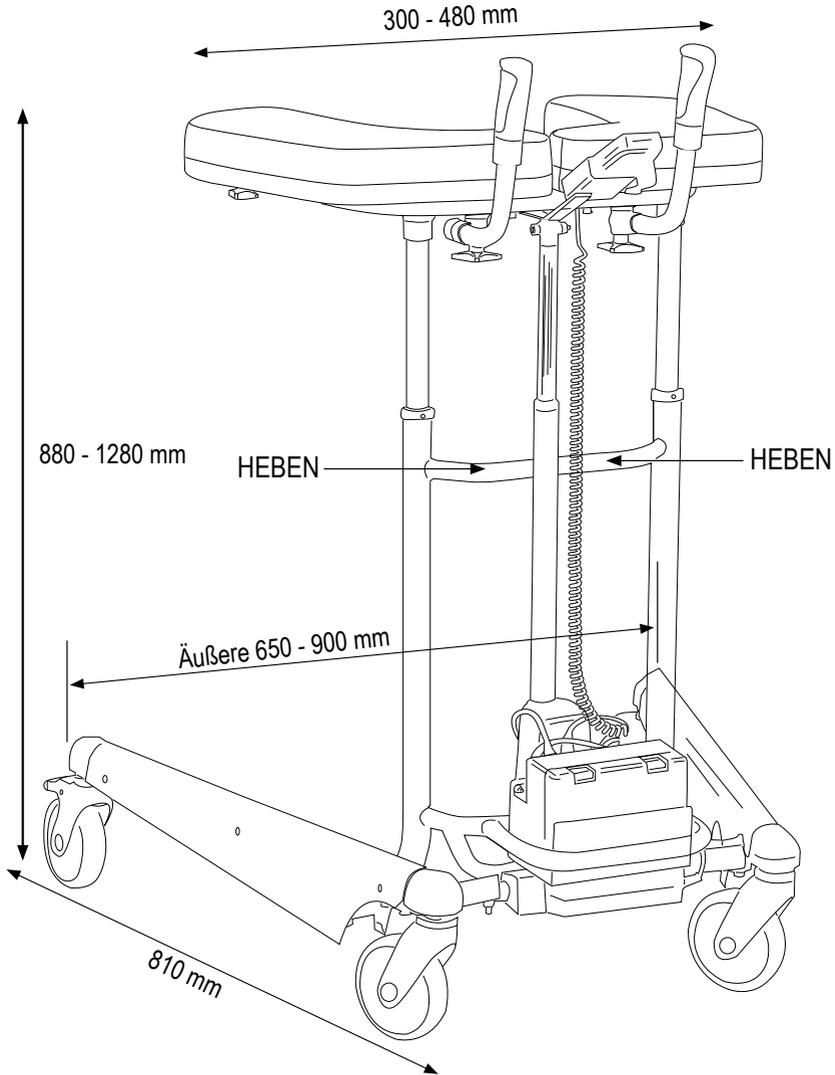

**Produktgewicht: 27 kg**  
**Maximales Benutzergewicht: 130 kg**

„HEBEN“ kennzeichnet den richtigen Griff beim Heben des Gehwagens während des Transports.

**ACHTUNG!** Gehoben werden sollte von mindestens zwei Personen.

CE CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC



IHR PFLEGEPARTNER

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter:  
Tel: +46 371 31800  
Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2 | SE-330 21 Reftele  
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION