

Art# 56-388-MULTI-S/M/L/XL + 56-388-KIT

Der Gehtrainingsgurt ist ein Zubehör, der die Sicherheit beim Gehtraining mit Bure Rise & Go erhöht. Beide Leistenriemen des Produkts sowie die Befestigungshaken reduzieren Risiken, die auftreten können, wenn der Benutzer zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen hat.

Das Zubehör besteht aus einem Gurt zum Aufrichten/Multi sowie Kit/Gehtraining mit 2 Befestigungsmodulen (Metall), die auf das Produkt Bure Rise & Go montiert werden. Verwenden Sie das gewöhnliche Gurt zum Aufrichten/Multi und schließen Sie das Kit/Gehtraining wie unten angegeben an.



Anlegen des Gehtrainingsgurts an den Patienten (Bild 1)

Der Gehtrainingsgurt beruht auf dem herkömmlichen Aufhilfsgurt. Zusätzlich gibt es 4 Bänder – 2 Leistenriemen und 2 Bänder mit Befestigungshaken.

Die Leistenriemen werden zwischen die Beine des Patienten geführt und in dem entsprechenden Verschluss gesichert. Die Befestigungsriemen/-haken hängen lose, bis der Patient im Bure Rise & Go gesichert ist (siehe Bild 3).



Bild 1

Befestigung der Befestigungsmodule auf Bure Rise & Go (Bild 2)

Die Befestigungsmodule (2 St.) werden von innen auf die jeweiligen Seiten der Armstütze (rechts und links) geschoben. Modul mit den beigegefügten Schrauben sichern. Stellen Sie sicher, dass das Modul ordentlich befestigt ist.

Die Module können auf einer beliebigen Stelle entlang der Schenkel der Armlehne befestigt werden – wobei wir empfehlen, die Module in die Mitte zu platzieren. Das bedeutet normalerweise, dass der Riemen/Befestigungshaken so kurz wie möglich gehalten werden kann, wenn der Benutzer gesichert ist.

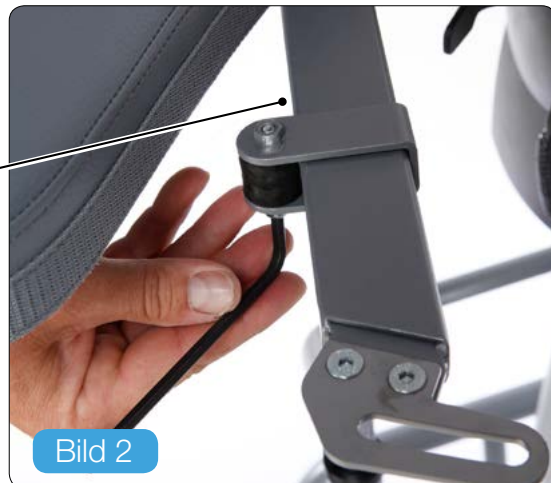


Bild 2

Sicherung des Patienten im Bure Rise & Go (Bild 3)

Bei Bedarf wird der Benutzer dadurch gesichert, dass die jeweiligen Karabinerhaken (rechte und linke Seite) in die Befestigungsmodule eingehakt werden. Befestigungsriemen so spannen, dass sie so kurz wie möglich sind.



Bild 3

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter: Tel.: +46 371 318 00 | Gate Rehab Development AB | Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele | info@gaterd.com | www.gaterd.com